



# クイックスタートガイド

**IQbuds**  
B O O S T


IQbudsアプリから  
IQbuds™を登録すると  
アップデートを  
お知らせします

## 梱包品の確認


IQbuds™本体 (L / R) × 1

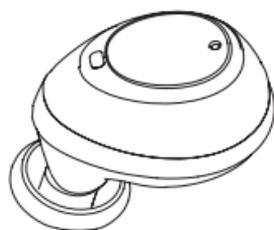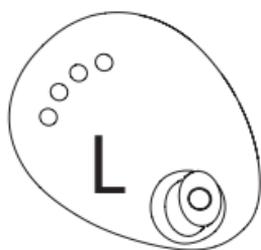

充電／携帯ケース × 1

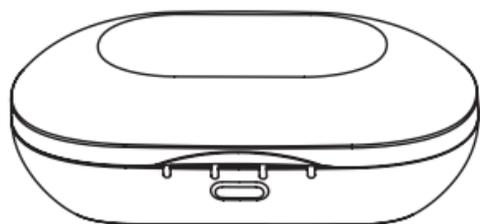


イヤーチップ

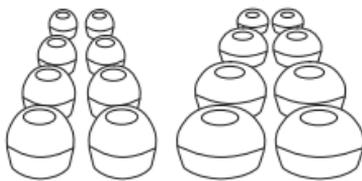

ラウンド型  
×4サイズ

オーバル型  
×4サイズ

USB充電ケーブル × 1

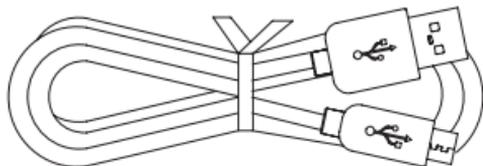


コンプライ製  
×3サイズ

※最初に製品が揃っていることをご確認ください

## 充電


### STEP 1

使用にあたっては充電ケースと本体両方の充電が必要です。

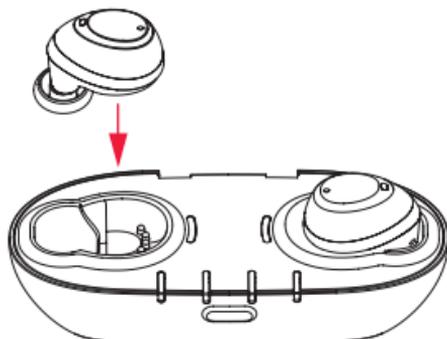

L/R両方の本体をケースに入れてください。この際本体とケースの金色のコンタクト部が正しく接触するようにご確認ください。フタを閉めると充電が開始され、本体充電中を示すケース外側の2つの赤いLEDが点灯します。

### STEP 2

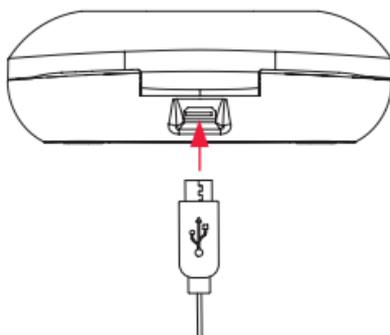

USB充電ケーブルをコンピューターや充電器に接続し、充電ケースに差し込んでください。ケースと本体両方に対し充電が開始されます。

ご購入後、初めて使用する際にケースと本体両方のフル充電にかかる時間	4時間
ケースのフル充電にかかる時間	2.5時間
USBケーブルの接続なしで本体のフル充電にかかる時間	1.5時間


▶ 初めて使用する際は最低30分の充電をおすすめします。

連続再生時間：音楽再生8時間、聴覚補助12時間

## インジケータ

本体とケースの充電状況はインジケータで確認できます。


### 本体の充電状況

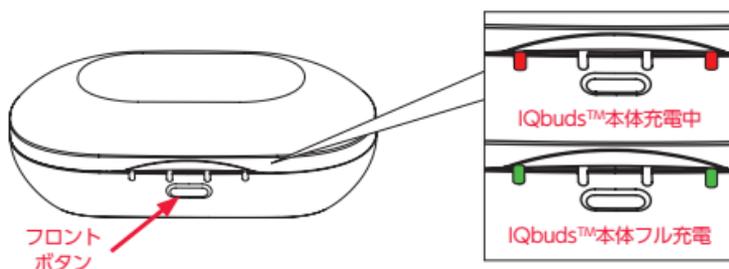

本体が正しくケースにセットされた状態でフタを閉めると上記のようにインジケータが本体の充電状況を表示します。  
もしインジケータが消えてしまった場合はケース前面の“フロントボタン”を一度押して再表示できます。(ボタンを押す時間は**2秒以下**)



### 充電ケースの充電状況

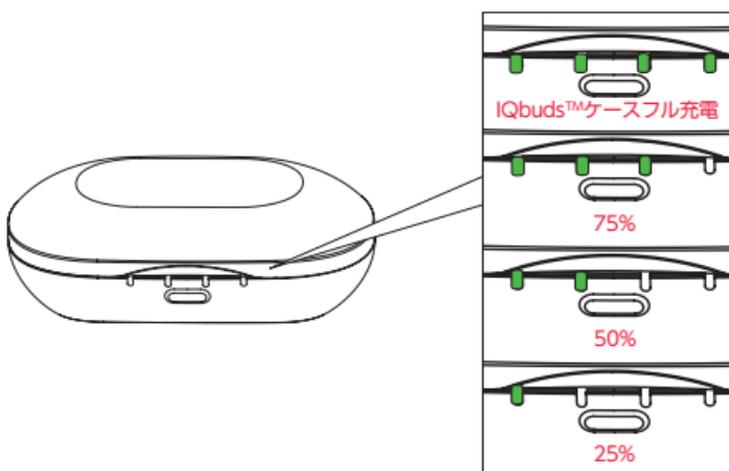

本体を入れていない状態でケースを開くとケースの充電状況を示すインジケータが上記のように表示されます。  
本体がセットされ、フタが閉じている場合は、ケース前面の“フロントボタン”を2秒以上長押しすることで表示できます。

## 装着

### STEP 1



イラストのように付属のイヤークリップを本体に取り付けます。しっかりとした装着のためにサイズ・形状の違うイヤークリップを試して耳をふさぐ最大のイヤークリップをお選びください。

### STEP 2



イヤークリップ側を下向きにして耳に装着してください。

### STEP 3



耳栓のように押し込んでください。装着時に本体を頭の後ろ側に傾けます。やや後ろに傾けることでフィット感が向上します。



イヤークリップがしっかりとフィットしていると遮音性能も向上します。付け心地が悪いほどキツイ場合はサイズダウンしてください。

## 専用アプリとのペアリング

### IQbudsアプリ



### **IQbudsアプリを使ってペアリングモードを有効に**

IQbudsアプリをダウンロードしてガイダンスに従って操作してください。

#### **STEP 1**

IQbuds™本体をケースから取り出します。

#### **STEP 2**

本体を耳に正しく装着します。

#### **STEP 3**

IQbuds™はタップセンサーです。本体L/Rのいずれかに5秒以上触れて「ペアリング」とアナウンスが聞こえるとペアリングモードになります。アプリとあわせて操作し、お持ちのモバイルデバイスとペアリングしてください。「コネクテッド」とアナウンスが聞こえたら接続完了です。



▶ 接続はモバイルデバイスのBluetooth設定で確認できます。


- IQbudsBoost\_XXX (Xは固有値)  
…通話/音楽再生
- IQbudsBoostApp\_XXX (Xは固有値)  
…アプリ用

#### **STEP 4**

アプリのチュートリアルに従ってあなたの聴覚レベルと環境に合うよう本体の調整をしましょう。

## 専用アプリの基本

### IQbudsアプリ

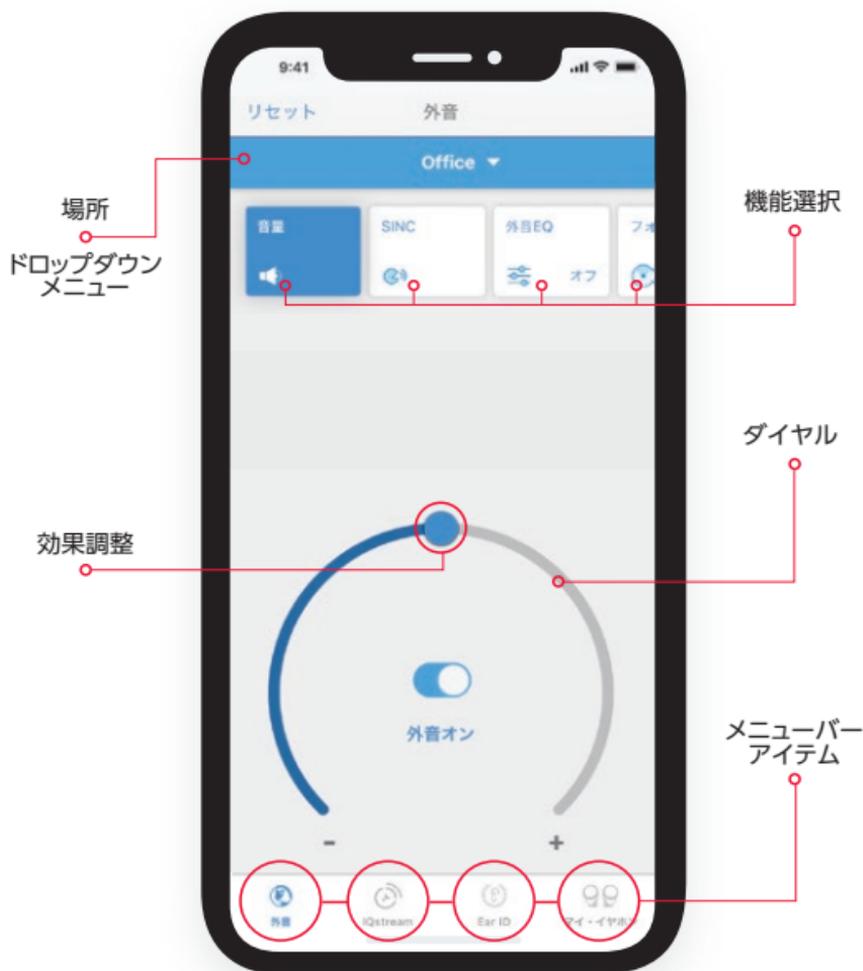

#### 外音（ヒアスルー）の設定

場所	場所ごとに効果をプリセット。よく使う場所の切り替えも簡単
音量	外音の音量を調節
SINC	環境音と人の声の聴こえ方を調整
外音EQ	高域／低域フィルター
フォーカス	前方フォーカス／360°マルチフォーカス切り替え

#### その他のメニューバー

IQstream	IQstream TV (別売) との連携*
EarID	キャリブレーションで聴覚補正し、IQbuds をパーソナライズ
マイ・イヤホン	各種設定やチュートリアルなど

※IQstream TVをお持ちでない場合、ガイドンスの最後に表示される「●●●●●●」をタップすることでメニューバーからIQstreamアイコンを削除できます。後からご購入された際はあらかじめIQstream TVとの接続が可能です。

## 本体 タップセンサー 操作方法

イヤホンは左右どちらもタップセンサーを内蔵し、タッチ操作に対応しています。タップ、ダブルタップ、ロングタップの操作を左右それぞれに設定でき、Siriの起動や再生/一時停止、曲送り/戻し、ボリューム調整を割り当てることが可能です。

### 出荷時設定

#### LEFT (左)


タップセンサー



	音楽再生	通話
タップ	再生/一時停止	着信に应答する ミュートコール オン/オフ
ダブルタップ	Siri/Google Now を有効にする	—
ロングタップ	—	通話を拒否/切断
5秒ロングタップ	ペアリングモード	

#### RIGHT (右)

タップセンサー

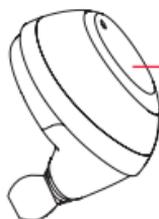

	環境	
タップ	外音 オン/オフ	
ダブルタップ	Siri/Google Nowを有効にする	
ロングタップ	お気に入り場所の変更	
5秒ロングタップ	ペアリングモード	



**NUHEARA**

※本製品ご利用にあたり外音取り込み機能がONになっている場合、ハウリングが発生することがございます。製品の異常ではございませんが、ハウリングが気になる場合には、外音取り込みレベルを下げてください。

<http://www.nuheara.co.jp>